



OTTALIN PERACET

**Medizinprodukt zur desinfizierenden
Aufbereitung von textilen Medizinprodukten.**

CE 0297

- OTTALIN PERACET ist eine Gleichgewichtspersessigsäure und enthält neben Wasser und Essigsäure 3,5 % Peroxyessigsäure und 30 % Wasserstoffperoxid
- Medizinprodukt Klasse IIa
- Bleichend und desinfizierend

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (20° C)	unverdünnt: 0,6
Dichte (20° C)	1,13 g/ml

Indikation, Zweckbestimmung

- OTTALIN PERACET dient zum **desinfizierenden Reinigen** (Waschen) von **textilen Medizinprodukten** (z. B. OP-Bekleidung, OP-Abdecktücher, OP-Bauchtücher) in Kombination mit Waschmittel.
- Das desinfizierende Waschverfahren dient der Vorbereitung der textilen Medizinprodukte zur visuellen Kontrolle (Qualitätssicherheit) und anschließenden Sterilisation.
- OTTALIN PERACET kann in Waschschleudermaschinen und in Taktwaschanlagen verwendet werden.
- OTTALIN PERACET wird bevorzugt automatisiert dosiert.

Kontraindikation

- Nicht für merklich mit Blut verunreinigte Wäsche geeignet. Die Desinfektion mit OTTALIN PERACET erfolgt in der Klarwäsche (Hauptwäsche). Wenn eine merkliche Verschmutzung mit Blut nicht ausgeschlossen werden kann, muss eine Vorwäsche durchgeführt werden.
- OTTALIN PERACET wird nur in Waschverfahren von Textilien eingesetzt und darf nicht direkt am Patienten angewendet werden.

Nebenwirkungen

- OTTALIN PERACET kann zum Ausbleichen der Textilien führen.
- OTTALIN PERACET kann Textilien oxidativ schädigen.

Hinweise

- Bei der Handhabung und Anwendung von OTTALIN PERACET muss persönliche Schutzausrüstung getragen werden, mindestens: Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe, siehe auch Sicherheitsdatenblatt.
- Kommt OTTALIN PERACET bei der Handhabung und Anwendung mit der menschlichen Haut oder Schleimhaut in Berührung, so können durch das organische Peroxid und die organische Säure Verätzungen auftreten und die Haut oder Schleimhaut bleichen.
- Werden Dämpfe von OTTALIN PERACET bei der Handhabung und Anwendung eingeatmet, so können durch das organische Peroxid und die organische Säure Verätzungen an den Atemwegen auftreten.
- In unverdünntem Kontakt von OTTALIN PERACET mit brennbarem Material kann eine Selbstentzündung erfolgen.
- Wird OTTALIN PERACET unverdünnt in Kontakt mit Laugen oder katalytisch wirksamen Metallen gebracht, kann eine heftige Reaktion eintreten.

Dosierung, Leistungsmerkmale

OTTALIN PERACET wird zur Klarwäsche nach Erreichen der Desinfektionstemperatur hinzugegeben. Folgende Kombinationen mit Kreussler-Waschmitteln wurden getestet und können verwendet werden:

- 2 ml/l DERVAL SOLO + 2 ml/l OTTALIN PERACET, 10 min, 60 °C, Flottenverhältnis 1:5 (1 kg Textilien Trockengewicht auf 5 l Waschlauge). [Wirkungsbereich A/B, Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Instituts]
- 2 g/l TREBON SI + 2 ml/l OTTALIN PERACET, 10 min, 60 °C, Flottenverhältnis 1:5. [Wirkungsbereich A/B, Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Instituts]
- 2 g/l DERVAL SOLO + 4 g/l OTTALIN PERACET, 10 min, 60 °C, Flottenverhältnis 1:5 (1 kg Textilien Trockengewicht auf 5 l Waschlauge). [bakterizide, fungizide und mykobakterizide Wirkung gemäß DIN EN 16616 (Phase 2, Stufe 2)]
- 4,5 g/l DERVAL SOLO + 4,5 g/l OTTALIN PERACET, 10 min, 60 °C, Flottenverhältnis 1:5 empfohlen. [viruzide Wirksamkeit gemäß DIN EN 14476 (Phase 2, Stufe 1)]

OTTALIN PERACET ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und wird mit der Waschflotte entsorgt.

Betreiber und Anwender

- OTTALIN PERACET ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.
- Der Betreiber muss das Sicherheitsdatenblatt seinen Beschäftigten zur Verfügung stellen.
- Der Anwender muss fachkundig im Umgang mit Chemikalien, Gefahrstoffen und Gefahrgut sein.
- Der Anwender muss sich vor Gebrauch von OTTALIN PERACET über die Gefahren im Umgang mit dem Produkt und über die Sicherheitsmaßnahmen informieren.
- Der Anwender muss fachkundig in der Prozessführung bei der wässrigen Aufbereitung von textilen Medizinprodukten sein.

OTTALIN PERACET darf nur entsprechend der oben definierten Zweckbestimmung (Bleiche und chemothermische Desinfektion von textilen Medizinprodukten in Waschverfahren) verwendet werden. Es unterliegt der Verordnung (EU) 2019/1148 und darf daher nicht an Dritte

weitergegeben werden. Der Betreiber muss dies gegenüber dem Hersteller mit der Endverbleibserklärung bestätigen.

Hinweise zur Lagerung und zum Gebrauch

- Kühl und nicht über 40 °C lagern.
- In gut durchlüfteten Räumen lagern.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Verfalldatum, verwendbar bis: 24 Monate nach Herstellungsdatum (bei sachgerechter Lagerung in ungeöffnetem Zustand), siehe Kennzeichnung auf dem Etikett.
- Nur im Originalgebinde mit Originalverschluss mit Entlüftung lagern.
- Vor Fremdzugriffen geschützt lagern.
- Gebinde nach jeder Entnahme wieder verschließen.
- Vor Verunreinigung schützen.
- Keine Substanz in das Gebinde zurückgießen.
- Bei Arbeiten am offenen Gebinde persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe auch Sicherheitsdatenblatt, mindestens: Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzhandschuhe).

Entsorgung

- Kleine Mengen OTTALIN PERACET können verdünnt über die Kanalisation entsorgt werden.
- Größere Mengen müssen als Gefahrstoff über professionelle Entsorgungsunternehmen vernichtet werden, siehe auch Sicherheitsdatenblatt.
- Werden kleine Mengen mit einem Lappen aufgenommen, muss dieser mit Wasser ausgespült werden, da sonst Selbstentzündungsgefahr besteht.

Hersteller

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustraße 87–93
65203 Wiesbaden
Deutschland

Kontakt

Informationen zu OTTALIN PERACET und anderen Kreussler-Produkten:

Web: www.kreussler.com

E-Mail: info@kreussler.com

Reklamationen/Vorkommnisse an: vigilance.tc@kreussler.com oder +49 611 9271-0

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Erklärung der Symbole



Hersteller

Herstellungsdatum



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis



Begleitpapiere beachten



Vor Sonnenlicht schützen

Fassung der Gebrauchsanweisung: 2021-11-09, Version 5